

E10

DE

Der Premium-Autoklav von Euronda für anwenderfreundliche Sterilisation



Euronda®
Pro System

E10

Der Premium-Autoklav von Euronda für anwenderfreundliche Sterilisation

4	E10 Der Premium-Autoklav von Euronda für anwenderfreundliche Sterilisation	18	Zubehör Schon dabei - Starter Kit Testsysteme Optionale Tray-Gestelle
6	Performance Die beste Sterilisation von Euronda	20	Dokumentation Print Set 1 Print Set 2 Print Set 3 E-WiFi E-Data & E-Memory software
8	Design Funktionale Eleganz	21	Wasseraufbereitung Aquafilter Pro Aquafilter 1:1 Aquadist Aquabox
10	Innovation Technik im Dienst des Menschen	24	Sterilisationszyklen B-Zyklen, N-/S-Zyklen
12	Dokumentation Lückenlose Dokumentation - flexibel und bedarfsgerecht	26	Technische Daten Technische Spezifikationen
14	Ergonomie Intuitive Anwendung - optimaler Workflow		
16	Sicherheit Dauerhaft zuverlässige Sterilisation		

Euronda Pro System

Products, Process, Protection



Desinfiziert

Verpackt



Thermo- desinfektion

Eurosafe 60



Ultraschall- reinigung

Eurosonic® 4D
Eurosonic® 3D
Eurosonic® Energy
Eurosonic® Micro



Folien- versiegelung

Euromatic®
Euroseal® Valida
Euroseal®
Euroseal® Infinity



Sterilisations- folien



**Euroseal®
Check**

Mit Euronda Pro System unterstützen wir die zuverlässige Aufbereitung von Medizinprodukten in der Praxis. Dabei steht die Sicherheit von Personal, Patientinnen und Patienten im Vordergrund. Erfolgreiche Infektionskontrolle gelingt, wenn jeder einzelne Hygiene-Schritt genau und zuverlässig funktioniert: Von der Sammlung kontaminierter Instrumente, über Reinigung, Desinfektion und Verpackung bis zur Sterilisation und Lagerung. Euronda Pro System stellt effiziente Werkzeuge für die Instrumentenaufbereitung zur Verfügung, die Praxishygiene einfach machen.



Sterilisiert



Autoklaven

E10
EXL
E9
E8



Testsysteme



Dokumentation



Wasser- aufbereitung

Aquafilter Pro
Aquafilter 1:1
Aquabox
Aquadist

E10

Der Premium-Autoklav
von Euronda für
anwenderfreundliche
Sterilisation



Wir haben intensiv gearbeitet und einen Autoklaven entwickelt, dessen Merkmale die Bedürfnisse von Zahnärztinnen, Zahnärzten und Hygienefachkräften erfüllen: leistungsfähig, effizient, funktional, ansprechend. Der E10 sterilisiert schnell, trocknet intensiv und ist sparsam im Strom- und Wasserverbrauch. Innovative Technologien machen ihn zu einem unauffälligen und zuverlässigen Praxisbegleiter, der sich flexibel individuellen Bedürfnissen anpasst.



Leistung

Schnellste sterilisationsergebnisse, ausgezeichnete Trocknung, strom- und wassersparender Betrieb.



Innovation

Die Assistenz-Systeme E-Touch, E-Light, E-Timer, E-Help oder E-Backup unterstützen die Praxisroutine. Technik im Dienst des Menschen.



Dokumentation

Volle Kontrolle durch lückenlose Dokumentation: Direkt am Gerät, in Ihrer Hygiene-Software oder mit verschiedenen Drucklösungen.



Ergonomie

Verbesserte Nutzerführung sorgt für intuitive Anwendung und optimalen Workflow.



Design

Elegant, schlicht und zeitlos funktional zeigt sich der E10.



Sicherheit

Innovative Filter- und Wartungssysteme ermöglichen jederzeit beste Sterilisationsergebnisse.

Die sorgfältige Auswahl und Konfiguration der Komponenten garantiert eine Top-Performance des Euronda Autoklaven:

- Leistungsstarke Vakuumpumpe;
- Quickstart-Dampfgenerator;
- optimierte Trocknungsphase;
- geringste Verbrauchswerte.



Performance

Die beste Sterilisation von Euronda



Best performance

Eine extrem leistungsfähige Vakuumpumpe und eine optimierte Trocknungsphase machen den E10 zu Eurondas schnellstem und effizientestem Autoklaven. Der Dampfgenerator liefert verzögerungsfrei präzise Mengen Sattedampf für die Sterilisation und trägt damit ebenfalls zur Senkung der Sterilisationszeiten und des Wasserverbrauchs bei.



Individuell

Fünf Programme zeichnen den Autoklaven für sichere B-Klasse-Sterilisation aus: 121° C, 134° C Standard, 134° C Prion, 134° C schnell, 134° C Prion schnell. Damit bereiten Sie verpacktes und unverpacktes, hohles und festes Material sowie Schutzkleidung und Instrumente normenkonform nach DIN EN 13060 auf. Zyklen für Vakuumtest, Helixtest und Bowie & Dick Test erlauben standardisierte Routinekontrollen. Bei Bedarf lassen sich darüber hinaus auch N- und S-Zyklen aktivieren. Alle Programme schalten Sie individuell frei.



Umweltfreundlich

Geschwindigkeit und Effizienz, Hand in Hand. Der E10 passt die Sterilisationsparameter automatisch der tatsächlichen Beladung an und gewährleistet so immer den optimalen Mix aus Sterilisationsleistung, Zykluszeit und Verbrauch.

Das elegante und schlichte Erscheinungsbild des E10 integriert ihn unauffällig in jeden Aufbereitungsraum. Klare Form und Linienführung lässt die Funktionsgruppen des Autoklaven einfach erkennen und leicht pflegen. Das vier Zoll große Farb-Display und das E-Light-Lichtsystem im Türgriff setzen farbige Akzente und unterstreichen das nutzerorientierte Design von Eurondas Premium-Autoklav.

Euronda
Pro System

E10



Design

Funktionale Eleganz



Elegant

Klare Linienführung, kompakte Form und elegante Ausstrahlung kennzeichnen das E10-Design.



Akzentuiert

Das farbige Touch-Display und der hinterleuchtete Türgriff sorgen für Akzente und erhöhen die Anwenderfreundlichkeit.



Funktional

Formgebung, Ausstattung und Design folgen einem funktionalen Gestaltungsprinzip und verleihen dem E10 eine wertige Optik.

Innovation

Technik im Dienst des Menschen



E-Touch

Das vier Zoll große farbige Touch-Display reagiert präzise auf Eingaben. Klare Menüführung und ein neues wortunterstützendes Icon-System macht die Anwendung intuitiv einfach.



E-Help

Immer das richtige Programm für die jeweilige Beladung. Das E-Help Assistenzsystem unterstützt Sie bei der Auswahl des Sterilsationszyklus. Geben Sie einfach Art und Menge des Sterilisiergutes an. Der E10 findet automatisch das geeignete Programm.



E-Light

Das in den Türgriff eingearbeitete Lichtsystem unterstreicht das elegantfunktionale Design des Autoklaven. Farbige LEDs zeigen den aktuellen Betriebszustand an. Erkennen Sie auf einen Blick, ob der Autoklav entladen werden kann, ein Zyklus läuft oder eine Benutzereingabe erforderlich ist.

Grünes Licht

Zyklusende, Beladung steril

Gelbes Licht

Zyklusende, Beladung steril, nicht trocken

Rotes Licht

Beladung nicht steril



E-Timer

Ihre Zeit ist wertvoll! Der E-Timer im E10-Autoklaven hilft Ihnen dabei Hygieneabläufe optimal zu planen. Stellen Sie die gewünschte Startzeit für einen Sterilisationszyklus individuell ein. Oder programmieren Sie regelmäßige Intervalle für einen Testzyklus und vergessen Sie nie wieder die Durchführung wichtiger Routinekontrollen.

Dokumentation

Lückenlose Dokumentation – flexibel und bedarfsgerecht

Der E10 ist mit zahlreichen Schnittstellen für die Dokumentation ausgestattet. Er sichert alle Sterilisationsdaten auf einer SD-Speicherkarte. Serienmäßig ist auch die manuelle oder automatische Datenübertragung per Netzkabel oder WLAN auf den Praxisrechner. In Verbindung mit anderen Geräten der Euronda Pro System Serie dokumentieren Sie den gesamten Aufbereitungsprozess an zentraler Stelle. Dafür steht Ihnen die Software E-Data kostenfrei zur Verfügung. Zur Freigabe auf Papier oder Kennzeichnung der Sterilgutchargen ergänzen Sie den E10 mit verschiedenen Druckern.



Print Set 1

Interner Thermo-
papierdrucker zur
Dokumentation des
Sterilisationszyklus



Print Set 2

Interner Etikettendrucker
zur Kennzeichnung der
Sterilgutchargen



Print Set 3

Externer Etikettendrucker
zum Ausdruck größerer
Mengen Sterilgutetiketten



Lückenlose Dokumentation

Machen Sie Ihre Aufbereitung dokumentationsicher. Binden Sie den E10 und andere Aufbereitungsgeräte in Ihre Praxissoftware ein. Archivieren Sie dort die Daten aller Hygieneschritte und ordnen Sie ggf. den Patientenakten zu. Mittels E-Data schaffen Sie eine Verbindung von Ihrem Euronda Pro System Gerät zu vielen gebräuchlichen Praxislösungen, wie Dios, Segosoft, DOCma und mehr.



Freigabe

Geben Sie Sterilisationschargen benutzerbezogen direkt am Gerät oder am Praxisrechner frei. In beiden Fällen wird die Freigabe digital protokolliert und archiviert.



Druckfunktionen

Entscheiden Sie selbst über die Druckfunktionen des E10. Für einen Kontrollausdruck der Sterilisationsergebnisse oder die Kennzeichnung der Sterilgutverpackungen stehen Ihnen bei Bedarf unterschiedliche Druckerlösungen zur Verfügung.

Ergonomie

Intuitive Anwendung -
optimaler Workflow





Perfekt aufgestellt

Ob als Tischautoklav oder eingebaut im Schrank, der E10 lässt sich einfach aufstellen und ist schnell startbereit. Im Stand-Alone-Betrieb genügt der Anschluss an eine 220-Volt Steckdose.



Inspection® System

Das bewährte Inspection System von Euronda unterstützt auch im E10-Autoklaven die einfache Reinigung und Pflege. Das ermöglicht dauerhaft zuverlässige Sterilisation und schont die Instrumente bei der Aufbereitung.



Wartungsfreundlich

Für einen einfachen Wartungszugang lassen sich die Seitenteile des Autoklaven leicht abnehmen. Alle Komponenten sind logisch angeordnet und gut erreichbar. Einzelne Baugruppen und -teile lassen sich mit wenigen Handgriffen bei Bedarf austauschen.



Zugangssystem zur
Tankgruppe




Wasseranschlüsse an
der Gerätefront und hinten

Sicherheit

Dauerhaft zuverlässige
Sterilisation



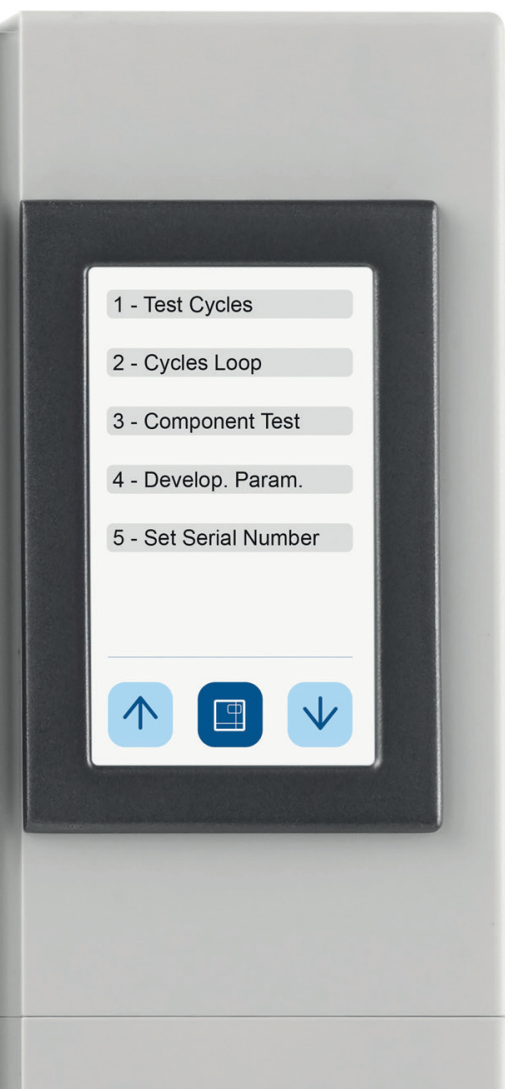

Leitfähigkeitsmesser

Optimale Wasserqualität ist der Schlüssel für Instrumenten und Autoklaven schonende Sterilisation. Deshalb überwacht ein Sensor permanent die Qualität des Speisewassers. Übersteigt die Leitfähigkeit den eingestellten Grenzwert gibt das Display eine Warnmeldung aus.



Dirt Control System

Wasserverunreinigungen können die Sterilisationsleistung beeinträchtigen und zu Ablagerungen auf dem Sterilgut führen. Das Dirt Control System filtert Verunreinigungen aus und leitet Schmutzwasser in einen separaten Tank.



Luft-Wasser-Separator



Die Vakuumpumpe im Autoklaven ist ein leistungsstarkes Bauteil. Dampf, Pflegeöle von Hand- und Winkelstücken oder feinste Schmutzpartikel können der Pumpe auf Dauer schaden. Der Luft-Wasser-Separator im E10 trennt diese Rückstände von der Luft und trägt so zum langfristigen Erhalt der Vakuumpumpe bei.



Wartungsprogramme

Nützliche Programme im E10 unterstützen Service-Techniker bei der Installation, Diagnose und Wartung des Autoklaven und tragen so zu optimalem Betrieb und Verfügbarkeit bei.

Schon dabei - Starter Kit

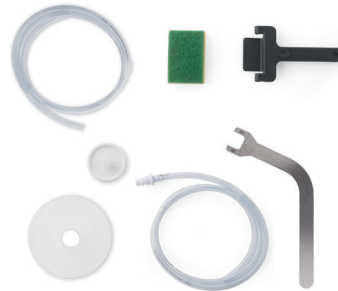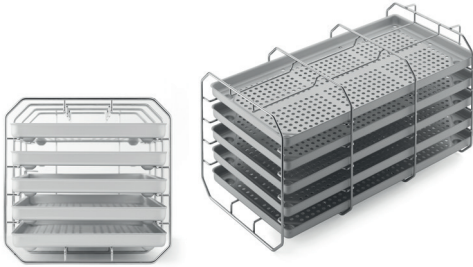

Tray-Gestell

Quadratisch geschnittenes Tray-Gestell aus Stahl für fünf Trays in Normgröße. Bei Drehung um 90° lassen sich drei Tray-Kassetten einsetzen.

Größe der Trays (B x H x T):

186 x 22 x 379 mm

Inklusive fünf Normtrays Aluminium

- Entwässerungsschläuche
- Schwamm
- Griff zur Entnahme der Trays
- Griff zum Einstellen der Tür
- Trichter

Testsysteme



Helix-Test


Zur Leistungskontrolle für B-Autoklaven mit fraktioniertem Vakuum. Nach EN 867-5 empfohlen bei der Sterilisation von Instrumenten mit Hohlräumen. Lieferung inklusive 250 Teststreifen.



Bowie & Dick Test

Dampfdurchdringungstest für Beladungen mit porösen Gegenständen, wie zum Beispiel Schutzkleidung.


Optionale Tray-Gestelle

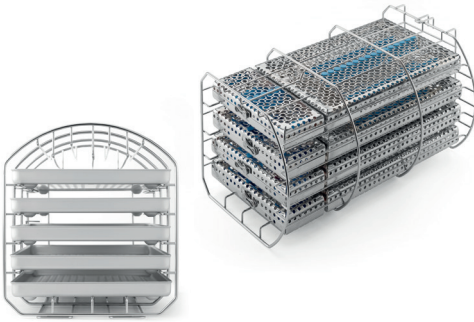

Tray-Gestell für Kassetten

Gewölbtes Tray-Gestell aus Stahl, das 5 Normtrays* aufnehmen kann. Bei Drehung um 90° lassen sich Kassetten einsetzen. Kapazität: 4 Kassetten 1/1 DIN + 4 Kassetten 1/4 DIN).


Lieferung ohne Trays und Kassetten

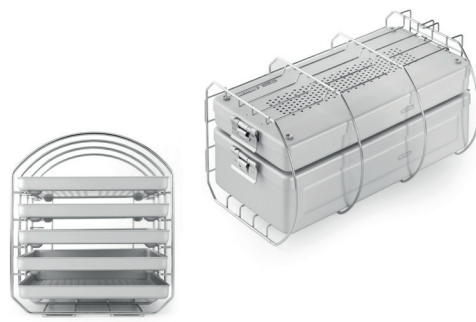

Tray-Gestell für Sterilisiercontainer

Gewölbtes Tray-Gestell aus Stahl für 5 Normtrays*. Bei Drehung um 90° lässt sich ein Sterilisiercontainer einsetzen (Maximalgröße: T=380 mm B=190 mm H=152 mm).

Lieferung ohne Trays und Kassetten

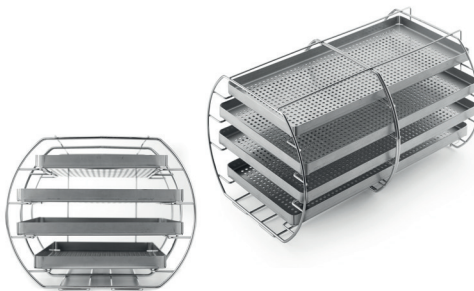

Kit Tray-Gestell XL


Gewölbtes Tray-Gestell aus Stahl in XL-Version für die Aufnahme von 4 Trays verschiedener Breite.

Größe der Trays (B x H x T):

175 x 17 x 380 mm (oben und unten)

220 x 17 x 380 mm (mittig)

*** Inklusive Trays**

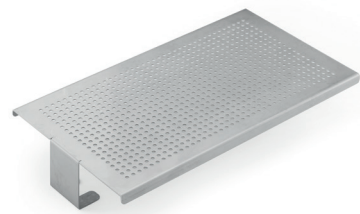

Universelle Ablagefläche

Unterlage aus Stahl für großvolumiges Sterilisiergut. Wird nach Entnahme des Tray-Gestells direkt in der leeren Sterilisationskammer platziert.

Abmessungen (B x H x T):

194 x 53,5 x 350 mm - 24 L

194 x 53,5 x 250 mm - 18 L

Print Sets



Print Set 1

Interner Thermo-
papierdrucker zum Ausdruck
und zur Archivierung des
Sterilisationszyklus auf
einem Kontrollstreifen.
Der Drucker wird
einfach im vorhandenen
Druckerschacht unterhalb
des Displays angeschlossen.



Print Set 2

Interner Drucker für
Etiketten. Zur Kennzeichnung
des Sterilguts nach
der Sterilisation mit
Klebeetiketten. Der Drucker
wird einfach im vorhandenen
Druckerschacht unterhalb
des Displays angeschlossen.



Print Set 3

Externer Drucker für
Etiketten. Für die schnelle
Ausgabe größerer
Mengen Klebeetiketten.
Zur Dokumentation
und Kennzeichnung
des Sterilguts. Einfache
Installation.



E-WiFi

Optionales WLAN-Set für den Anschluss der
Autoklaven E10, E9 und des Folienschweißgerätes
Euroseal® Valida an PC, Tablet oder Smartphone. Mit
E-WiFi sind alle Daten jederzeit abrufbar und werden
im Sterilisationsregister auf dem PC aktualisiert. Die im
Set enthaltene Software E-Link kann einfach auf einem
PC mit Windows- oder iOS-Betriebssystem installiert
werden und ermöglicht die Steuerung von bis zu 5
Euronda Geräten mit installiertem Set E-WiFi.



E-Memory Software

Mit E-Memory den
Überblick über Chargen
und Freigaben Ihrer
Instrumentenaufbereitung
behalten. Die übersichtliche
Hygiene-Software
verwaltet die Protokolldaten
von Euronda Pro System
Geräten. Übertragen
Sie neue Zyklusdaten
automatisch oder manuell.
E-Memory ist als Download
kostenfrei verfügbar für
Windows und iOS auf
euronda.de

Wasseraufbereitung



Aquafilter Pro

Der Aquafilter Pro dient zur Bereitstellung von größeren Mengen demineralisiertem Speisewasser. Zum Beispiel für die maschinelle Reinigung und Desinfektion und die Sterilisation im Autoklaven. Die Anlage wird empfohlen zur Versorgung von Thermodesinfektoren, wie dem Eurosafe 60 und verhindert Oberflächenbeläge und Fleckenbildung bei der Reinigung und Desinfektion. Optional kann der Aquafilter Pro zusätzlich Autoklaven oder andere Geräte mit demineralisiertem Wasser versorgen. Ein Leitwertmessgerät zeigt die aktuelle Wasserqualität an. Das Set enthält 2 Patronen. Ist die Leistung einer Patrone erschöpft, schließen Sie die zweite an und nutzen unseren Regenerations-Service für die erste Patrone. Damit stellen wir eine kontinuierliche Wasserversorgung ohne Ausfallzeiten sicher.

Anschluss von:
RDG + Autoklav

Wassergewinnung:
950 Liter pro Stunde

Min. / max.
Versorgungsdruck:
1,5 / 10 bar

Leitfähigkeit des
Ausgangswassers:
0,1 bis 20 μ S

Gerätemaße (D x H):
240 mm x 740 mm

Gewicht:
ca. 25 kg



Lieferung im
2er-Set



Inklusive
Leitwertmessgerät



Aquafilter 1:1

Wasserfilter zur Herstellung von demineralisiertem Wasser für einen Autoklaven oder anderen Anwendungen in Übereinstimmung mit der EN 13060 (Leitfähigkeit $<15 \mu\text{S}/\text{cm}$). Versorgt Euronda-Autoklaven automatisch mit demineralisiertem Speisewasser für die Sterilisation. Eine mehrfarbige LED signalisiert die Wasserqualität und ermöglicht einen rechtzeitigen Wechsel der Mischbettharz-Patronen ohne Ausfallzeiten. Einfacher Anschluss und stromloser Betrieb an Euronda-Autoklaven. Eine Abschaltautomatik zur Vermeidung von Wasseraustritt kann nachgerüstet werden. Aufstellung als Tischgerät, in einem Schrank oder an der Wand montiert. Lieferung inklusive Filterpatronen für den Ionenaustausch, Schlüssel für den Patronenwechsel, Schlauch für den Wasser-Anschluss, Schlauch und Kabel für den Anschluss an den Autoklaven. Filterleistung: Der Aquafilter 1:1 bereitet durchschnittlich 1 Liter Wasser pro Minute auf.

Anschluss von:

1 Autoklav

Wassergewinnung:

1 Liter pro Minute

Abmessungen (B x H x T):

390 x 455 x 145 mm

Leergewicht:

8.4 kg



Aquadist

Das Aquadist erzeugt destilliertes Wasser durch Verdampfen von Leitungswasser und anschließende Kondensation des Dampfes. Der Wasserfilter produziert ca. 0,7 Liter Wasser pro Stunde. Tankvolumen 4 Liter. Das Aquadist erfüllt die Anforderungen zur elektromagnetischen Verträglichkeit (2004/108/UE) und Niederspannung (2006/95/UE).

Wassergewinnung:

0,7 Liter pro Stunde

Gerätemaße (Ø x H):

230 x 360 mm

Leergewicht:

3.5 kg



Aquabox

Die Aquabox rüstet Euronda-Autoklaven für eine externe Wasseraufbereitung aus. Sie eignet sich zum Betrieb von Euronda-Autoklaven mit vorhandenen Osmoseanlagen oder Aufbereitungssystemen anderer Hersteller. Einfache Installation an alle B-Klasse-Autoklaven von Euronda. Geräte mit Leitfähigkeitsmesser, wie der E8, E9, E10 und EXL, überwachen automatisch die Qualität des zugeführten Speisewassers.

Abmessungen (B x H x T):

100 x 100 x 50 mm

Leergewicht:

0.5 kg

Sterilisationszyklen

	B 134		B 121		
	Massiv, porös und hohl sowie verpacktes und unverpacktes Material		Massiv, porös und hohl sowie verpacktes und unverpacktes Material. Besonders geeignet für Kunststoffteile, Turbinen und Handstücke		
	18 L	24 L	18 L	24 L	
Temperatur	134°C	134°C	121°C	121°C	
Druck	2.05 bar	2.05 bar	1.05 bar	1.05 bar	
Sterilisationszeit (Minuten)	4'	4'	20'	20'	
Trocknungszeit (Minuten)	15'	15'	15'	15'	
Gesamtdauer bei Standardbeladung* (Minuten)	21'	24'	39'	40'	
Höchstbeladung massiv / porös	4.5 kg / 1.5 kg	6 kg / 2 kg	4.5 kg / 1.5 kg	6 kg / 2 kg	

N-Zyklen/S-Zyklen

(Passwortgeschützt, Aktivierung auf Anfrage)

	S 134		S 121		
	Unverpackte Kunststoffteile oder massive verpackte Materialien		Massive, verpackte und unverpackte Materialien		
	18 L	24 L	18 L	24 L	
Temperatur	134°C	134°C	121°C	121°C	
Druck	2.05 bar	2.05 bar	1.05 bar	1.05 bar	
Sterilisationszeit (Minuten)	4'	4'	20'	20'	
Trocknungszeit (Minuten)	15'	15'	15'	15'	
Gesamtdauer bei Standardbeladung* (Minuten)	17'	17'	29'	29'	
Höchstbeladung massiv	4.5 kg	6 kg	4.5 kg	6 kg	

*Nettozeiten exklusive Trocknung. Zeiten können beladungsabhängig abweichen.
** Verfügbarkeit der Zyklen auf Grund nationaler rechtlicher Bestimmungen ggf. eingeschränkt.

	B 134 prion		B 134 - rapid		B 134 prion - rapid	
	Prionenzyklus für verpacktes und unverpacktes massives, poröses und hohles Material		Schnellzyklus für verpacktes und unverpacktes massives, poröses und hohles Material. 1 Tray Beladung		Prionen-Schnellzyklus für verpacktes und unverpacktes massives, poröses und hohles Material. 1 Tray Beladung	
	18 L	24 L	18 L	24 L	18 L	24 L
	134°C	134°C	134°C	134°C	134°C	134°C
	2.05 bar	2.05 bar	2.05 bar	2.05 bar	2.05 bar	2.05 bar
	18'	18'	3'5"	3'5"	18'	18'
	15'	15'	4'	4'	4'	4'
	35'	37'	20'	23'	35'	37'
	4.5 kg / 1.5 kg	6 kg / 2 kg	0.6 kg / 0.2 kg	0.6 kg / 0.2 kg	0.6 kg / 0.2 kg	0.6 kg / 0.2 kg

	N 134		N 121	
	Unverpackte massive Instrumente		Unverpackte massive Produkte und Kunststoffteile	
	18 L	24 L	18 L	24 L
	134°C	134°C	121°C	121°C
	2.05 bar	2.05 bar	1.05 bar	1.05 bar
	4'	4'	20'	20'
	4'	4'	4'	4'
	18'	18'	33'	33'
	4.5 kg	6 kg	4.5 kg	6 kg

Technische Daten

	E10 - 18 L	E10 - 24 L
Aussenabmessungen	460 x 455 x 610 mm (B x H x T)	
Leergewicht (mit Korb und Trays)	47.5 kg	50.5 kg
Netzspannung	230 V 50/60 Hz	
Leistungsaufnahme	2300 W 10 A	
Betriebstemperatur	+5 - +40°C	
Maximale Betriebshöhe	≤ 2000 m (ü.M.)*	
Mindesttiefe der Stellfläche	500 mm	
Mindestbreite der Stellfläche	460 mm	
Mindestabstand über dem Tank	0 mm bei frei zugänglicher Wassereinfüllabdeckung	
Mittlerer Geräuschpegel	50 dB	
Last auf der Stellfläche (bei vollem Tank und maximaler Beladung)	47.5 + 8.5 + 4.5 = 60.5 kg Gewicht pro Standfuß: 15.125 kg	50.5 + 8.5 + 6 kg = 65 kg Gewicht pro Standfuß: 16.25 kg
Betriebsbedingungen	Betrieb nur in geschlossenen Räumen - Max. relative Luftfeuchtigkeit 85 % - Max. Netzspannungsschwankung ± 10 % - Installationskategorie (Überspannungskategorie) II - Kontaminationsgrad 2	
Wasserverbrauch pro Zyklus	300 ml	
Tankvolumen (Frischwasser / Abwasser)	5 / 3.5 Liter	

* Bei einem Betrieb in Höhen von über 2000 m Euronorm SPA kontaktieren

Sicherheitseinrichtungen

- Schutz gegen:
- Kurzschluss
 - Überhitzung
 - Überdruck
 - Versehentliches Öffnen der Tür
 - System zur Prozessevaluation
 - Selbstdiagnosesystem in Echtzeit

Normen

- EN 13060
- EN 14971
- EN 61010-1
- EN 61010-2-040
- EN 61326
- EN 13445

Dokumentation


- Betriebsanleitung
- Konformitätserklärung für die Kammer
- Konformitätserklärung des Autoklaven
- Garantieschein, Gewährleistung 2 Jahre oder 3000 Zyklen
- Installationskarte
- Serviceheft

Certificazioni


- Der E10-Autoklav stimmt mit der aktuellen Fassung der Richtlinie 93/42/EWG überein
- Medizinprodukt der Klasse II B
- Kammer entspricht der Druckgeräte-Richtlinie 2014/68/EU
- Unternehmen: ISO 9001, ISO 13485
- CE Type Ref: E10- 18 L, E10- 24 L

Technische Spezifikationen


Platzbedarf insgesamt
(mm)

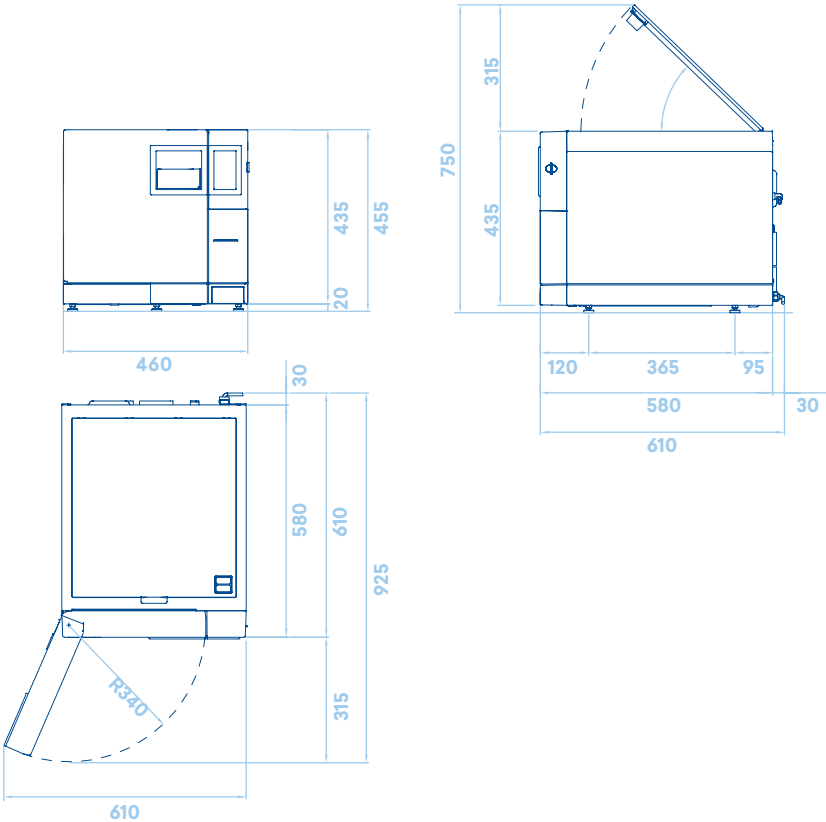

Nutzraum
E10 - 18 L

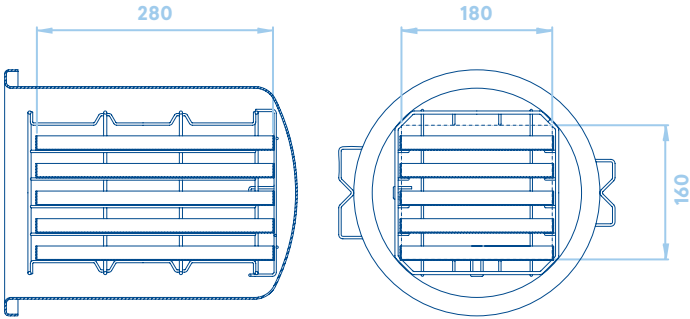

Nutzraum
E10 - 24 L

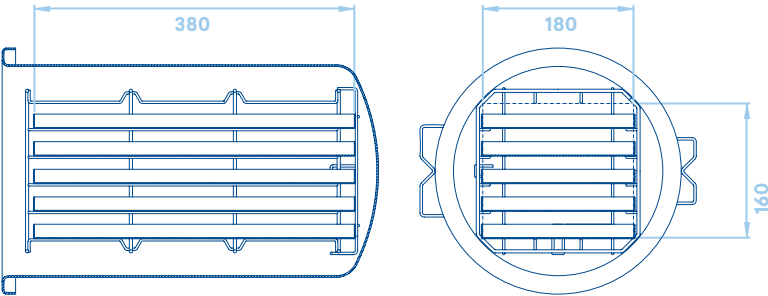

Euronda Spa® 2021

Kopie, Scan und/oder
Reproduktion des Katalogs
nicht gestattet. Alle Rechte
vorbehalten.

Bilder, Beschreibungen,
Abmessungen und
Technische Daten in
diesem Prospekt dienen
der unverbindlichen
Information. Irrtümer und
Schreibfehler vorbehalten.

Wir behalten uns das Recht
vor, jederzeit und ohne
Ankündigung Änderungen
an den hier beschriebenen
Eigenschaften und
Funktionen der Produkte zu
machen.

Euronda Spa

Via Chizzalunga 1
36066 Sandrigo
Vicenza, Italy
t (+39) 0444 656111
f (+39) 0444 656199
m info@euronda.com
www.euronda.com

Deutschland

Euronda Deutschland
Am Landwehrbach 5
48341 Altenberge, Deutschland
t (+49) 2505 9389 0
f (+49) 2505 9389 29
m info@euronda.de
www.euronda.de

France

Euronda France Eurl
ZAC les Vallées, Avenue de Bruxelles
60110 Amblainville, France
t + 33 (0) 3 44 06 69 70
f + 33 (0) 3 44 02 03 89
m info@euronda.fr
www.euronda.fr

España

Euronda - Identyd
Identyd, Calle Músico
Antonio Rodríguez de Hita, 12
Bajo 30007 Murcia
t 900102034
m info@euronda.es
www.euronda.es

Russia

OOO Euronda Russia
193149 Leningradsakaya obl.,
Vsevolozhsky r-on,
d. Novosaratovka, ul.
Pokrovskaya, dom 41, litera B.
Russia
t + 7 (812) 635 88 94
m info@eurondarussia.com
www.eurondarussia.com

Euronda®