

Produktinformation

MD 535 Gipsentferner



MD 535 auf einen Blick

- Gebrauchsfertige Lösung zum Entfernen von Gips und Alginaten von Abdrucklöffeln, Anrührspateln, Gipsmessern, Anmischbechern (auch von Vakuum-Mischgeräten), prothetischen Materialien aller Art, kieferorthopädischen Regulatoren, etc.
- Hervorragende Reinigungskraft – beseitigt hartnäckigste Verunreinigungen.
- Geeignet für Einsatz im Ultraschallgerät.
- Mit Aktivitätsindikator.

Eigenschaften

MD 535 aus der Dürr System-Hygiene ist ein Spezialreiniger mit hoher Reinigungskraft zur Entfernung von Gipsen und Alginaten von Abdrucklöffeln, Anrührspateln, Gipsmessern, Anmischbechern (auch von Vakuum-Mischgeräten), prothetischen Materialien aller Art, kieferorthopädischen Regulatoren etc.

Produktzusammensetzung

MD 535 basiert auf einer Kombination von Komplexbildnern (15–30 %), alkalischen Reinigungskomponenten (< 5 %) und Hilfsstoffen.

Anwendung

MD 535 wird unverdünnt angewendet. Zu reinigende Teile in MD 535 einlegen und Lösung einwirken lassen. Nach der Behandlung Reinigungsgut mit Wasser spülen. Der Reinigungsvorgang wird durch den Einsatz eines Ultraschallgerätes und durch Erwärmung auf max. 50 °C beschleunigt. Lösung nach Bedarf erneuern. Aufsteigende Gasbläschen zeigen die Reinigungswirkung an. Ist dies nicht mehr der Fall, muss eine frische Lösung verwendet werden. Rückstände in der Lösung beeinträchtigt die Wirkung von MD 535 nicht.

Umweltverhalten

Die Verpackung ist aus Polyethylen und Polypropylen und somit stofflich und thermisch verwertbar. Für Recycling Flasche mit Wasser ausspülen.

Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt.

Haltbarkeit

Produkt nach Ablauf des aufgedruckten Verfallsdatums nicht mehr verwenden.

Gebindegröße

2,5 l-Flasche

Lagerung

An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.

Allgemeine Hinweise

Bei verchromten und vernickelten Abformlöffeln ist die Verträglichkeit gegenüber MD 535 zu prüfen. Abformlöffel aus Aluminium nicht länger als 1 Stunde in MD 535 einlegen. Es kann zu Abweichungen von Produktfarbe/Geruch kommen, insbesondere bei der Lagerung im Sonnenlicht. Diese Farb- bzw. Geruchsveränderung hat jedoch keinen Einfluss auf die Reinigungsleistung des Produktes. Anwendung ausschließlich durch Fachpersonal. Alle im Zusammen-

Produktinformation

MD 535 Gipsentferner

hang mit dem Produkt auftretenden schwerwiegenden Vorkommnisse sind umgehend dem Hersteller und der zuständigen Behörde Ihres Mitgliedstaats zu melden.

Gefahrenhinweise

MD 535 ist nach CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt.

pH-Wert: 7,5 – 8,5



Vertrieb

Dürr Dental SE
Höfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
www.duerrdental.com
info@duerrdental.com

Hersteller

orochemie GmbH + Co. KG
Max-Planck-Straße 27
70806 Kornwestheim
Germany
www.orochemie.de
info@orochemie.com